

Guide d'instruction Aperio ImageScope

Ce guide d'instructions présente l'interface de l'application et ses principaux composants. Il illustre également comment visualiser plusieurs images (diapositives), effectuer un zoom avant/arrière et un panoramique.

Se familiariser avec l'interface

Familiarisez-vous avec l'interface de l'application. Les zones surlignées en rouge sont les principaux composants.

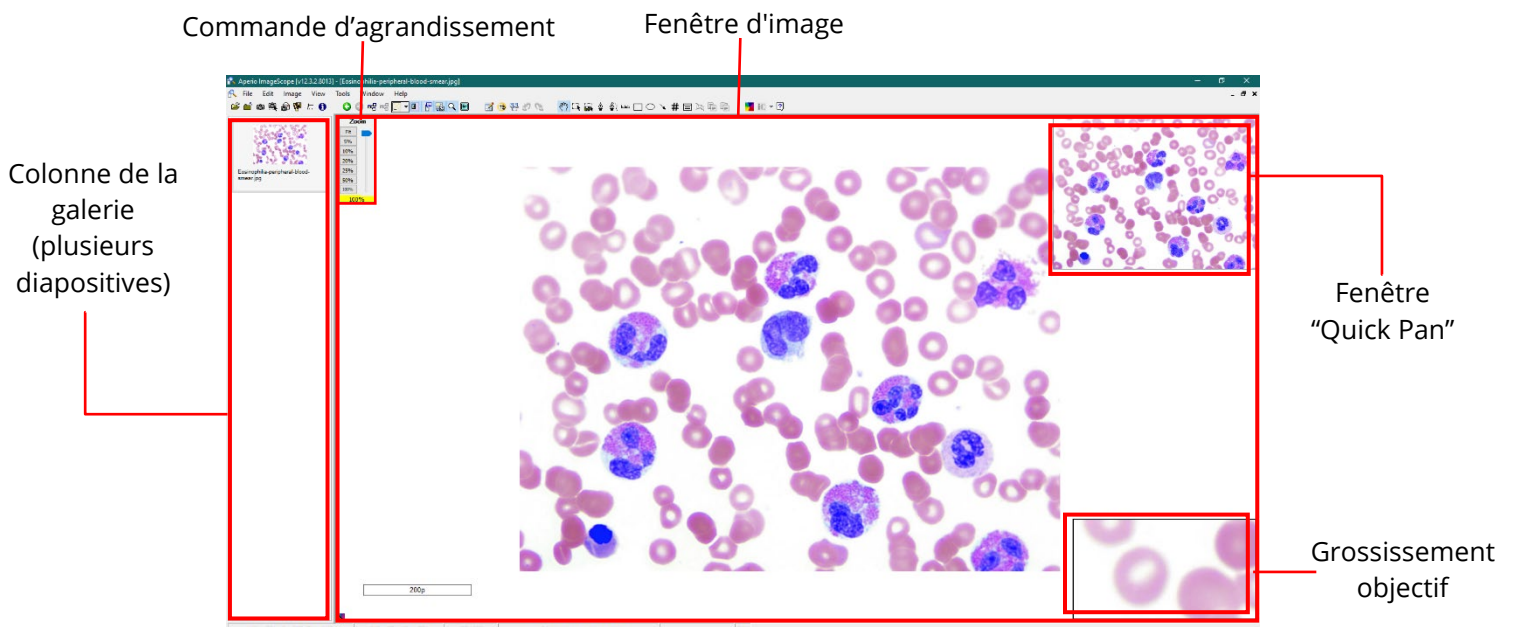


Figure 1: Une capture d'écran de l'interface de l'application Aperio ImageScope.

Changement d'images (diapositives)

Vous devrez naviguer entre les différentes images (diapositives) ouvertes dans la visionneuse (si plusieurs images sont chargées). Pour ce faire, suivez l'étape ci-dessous.

- Cliquez sur la vignette de l'image souhaitée, affichée dans la colonne Galerie sur le côté de l'image.

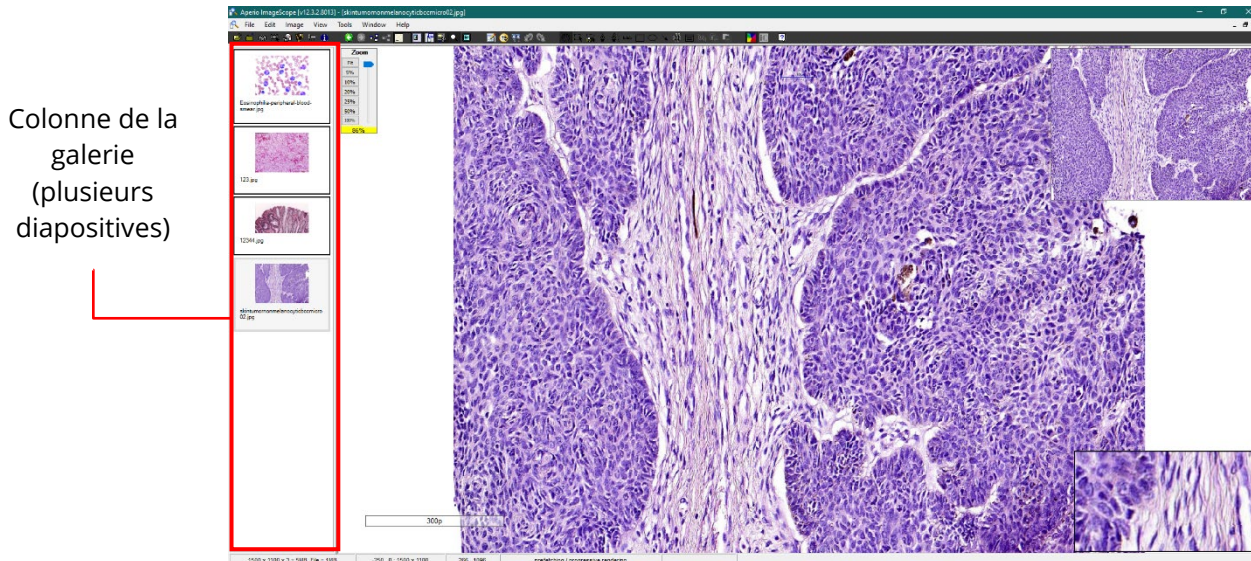


Figure 2: Une capture d'écran d'Aperio ImageScope montrant la colonne Galerie.

Fonctionnalité de zoom

Aperio ImageScope offre une fonctionnalité de zoom avec des niveaux de grossissement prédéfinis de 5%, 10%, 20%, 25%, 50% et 100%. Le curseur peut également être utilisé pour effectuer un zoom avant et arrière. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la fonction de zoom.

Il existe deux options pour effectuer un zoom avant/arrière sur une image. Sur la **commande d'agrandissement** :

- Option 1 : maintenez le clic gauche sur le **curseur de grossissement** et faites-le glisser vers le bas pour effectuer un zoom avant ou vers le haut pour effectuer un zoom arrière.

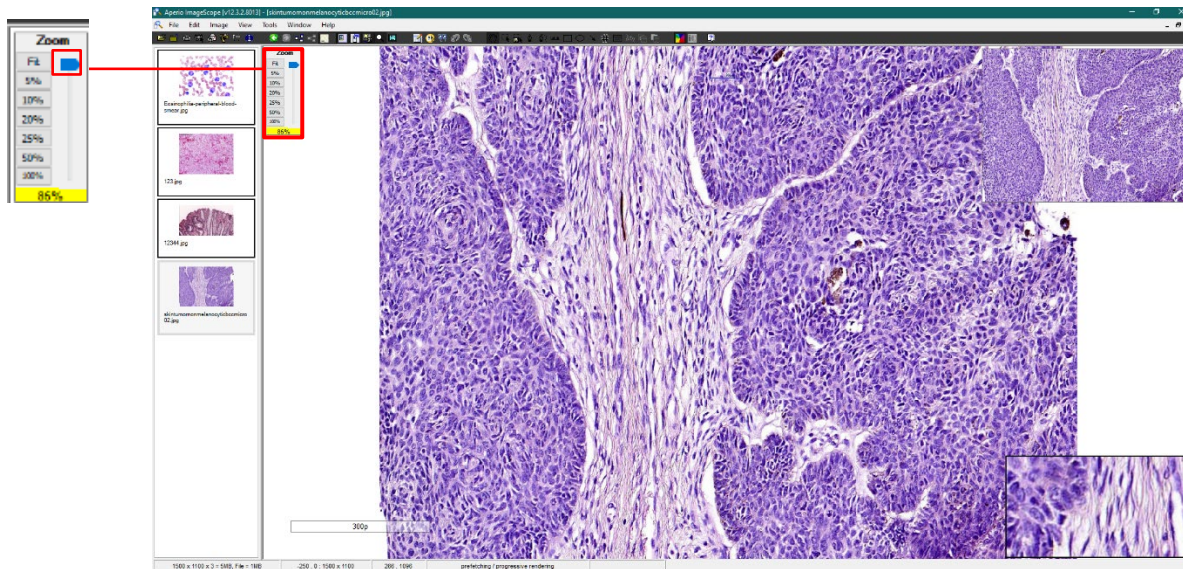


Figure 3: Une capture d'écran d'Aperio ImageScope montrant le curseur de grossissement.

Option2 : Cliquez sur l'une des options de niveau d'agrandissement prédéfinies disponibles à côté du curseur d'agrandissement.

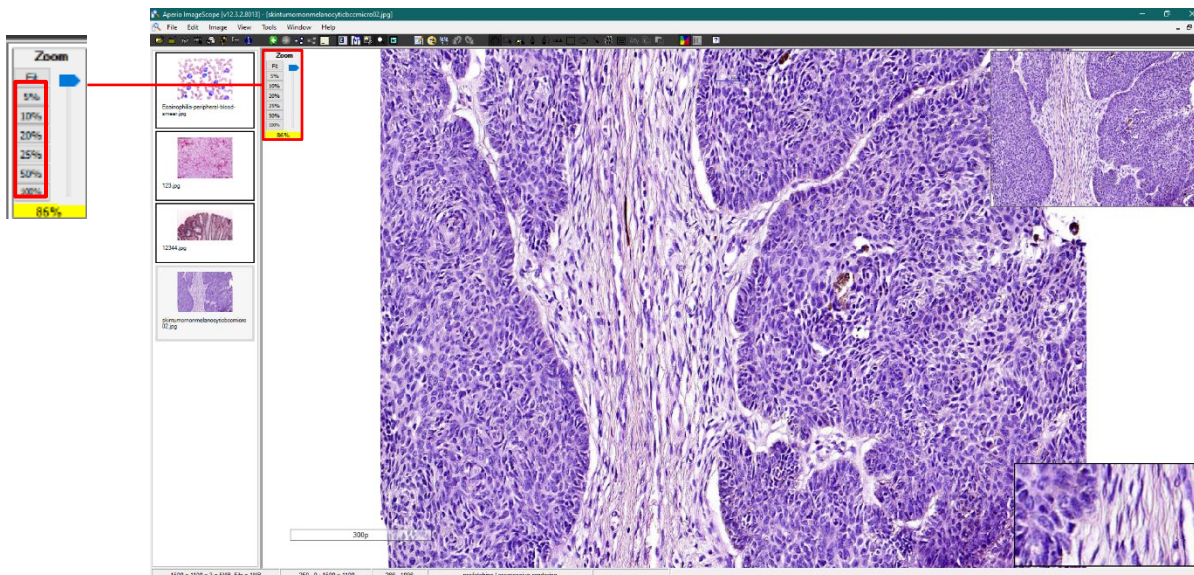


Figure 4: Une capture d'écran d'Aperio ImageScope montrant les options de grossissement prédéfinies.

Fonction panoramique (déplacement sur l'image)

Pour visualiser une zone ou un côté particulier de l'image après avoir effectué un zoom avant, suivez la ou les étapes ci-dessous :

- Placez le curseur de la souris sur n'importe quelle zone de l'image. Le curseur se transforme en une icône de main ouverte.



Figure 5: Une icône de curseur en forme de main ouverte.

- Maintenez le clic gauche de la souris. Le curseur se transforme en une icône de main fermée.



Figure 6: Une icône de curseur en forme de main fermée.

- Tout en maintenant le clic gauche, faites glisser la souris dans n'importe quelle direction pour déplacer la zone de visualisation de l'image.

Vous pouvez également accéder directement à une zone spécifique en cliquant dessus dans la fenêtre **Quick Pan**.

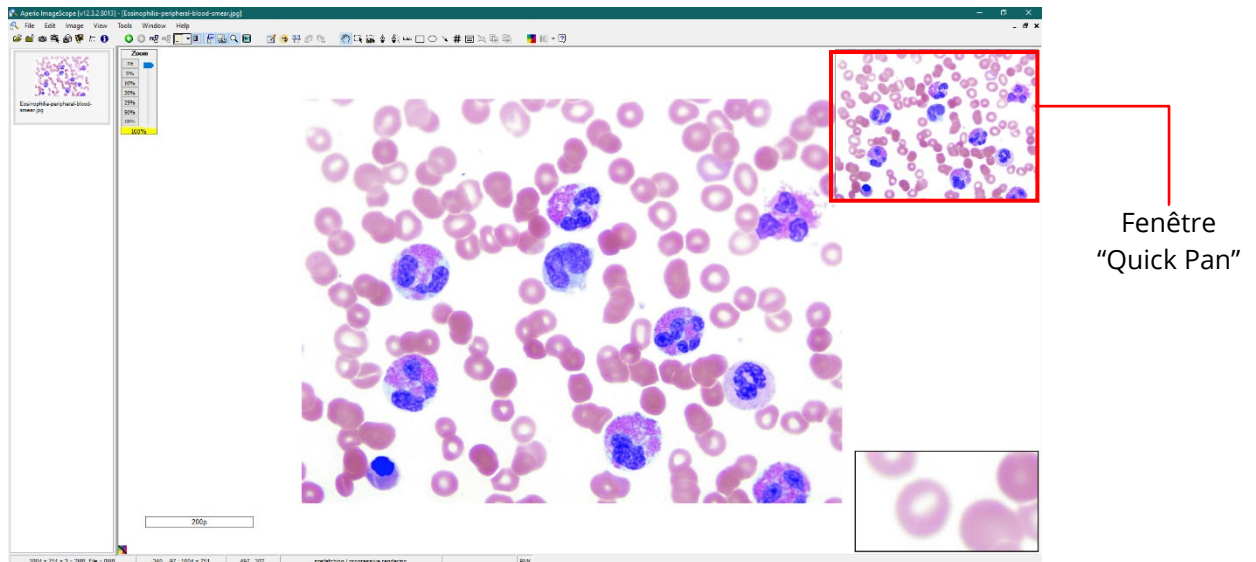


Figure 7: Une capture d'écran d'Aperio ImageScope montrant la fenêtre Quick Pan.